

Knitted Knocker – kleine deelprothese

door Jose Hertogs en De Breischool

Referenties:

Tutorial van de kleine deelprothese wordt aan gewerkt.

Dikte garen:



Middel Fijn: breinld 3.25— 3.75 mm



Moeilijkheidsniveau:



Gemiddeld

Intermediate / Intermédiaire / Intermedio



Maat & eindafmetingen:

volgens maattabel volgende bladzijde

Materialen:

- Rondbreinaalden of korte naalden zonder punten 3,5 mm (of aanpassen voor juiste stekenverhouding)
- Lammy RIO (100% gemercenterde katoen, 87 m, 50 gr): 1 bolletje, kleur naar keuze of
- voor zwemprothese: Lammy Victory (100% acryl, 125 m, 50 gr): 1 bolletje kleur naar keuze
- Bordurnaald
- Fiberfill
- Stekenmarkeerders

Stekenverhouding:

2 tot 2,5 steken op 1 cm (om tijd te besparen, brei eerst een proeflapje in het rond)

Notities:

- In magic loop breien als je met rondbreinaalden werkt

Afkortingen:

A	averechte steek
2Rsam	Brei twee steken recht samen (wijst naar rechts).
GK	Goede Kant
Mva	Meerder 1 st voor achter: brei 1 st recht maar laat de steek niet van de linker naald glijden, nogmaals in de achterkant van dezelfde steek, brei de steek en laat hem afglijden.
M1L	Meerdering met de tussenliggende draad: steek de naald van voor naar achteren onder de tussenliggende draad en zet op de linkernaald, brei recht in de achterste lus (wijs naar links).
PM	Plaats Marker
R	Rechte steek
St	Steek
Tr	Toer
VK	Verkeerde Kant

Werkwijze

Zet 3 st op.

Rg 1 (VK): 2 a, mva (4 st)

Rg 2 (GK): 3 r, mva (5 st)

Knitted Knocker – kleine deelprothese

door Jose Hertogs en De Breischool



Rg 3: 4 a, mva (6 st)

Rg 4: a

Sluit in het rond, splits je werk met 3 steken op iedere naald, ga verder in het rond met magic loop techniek

Tr 1: * 2 r, m1L; herh vanaf * tot einde tr (9 st)

Tr 2: * 3 r, m1L; herh vanaf * tot einde tr (12 st)

Tr 3: 3 r, m1L, PM voor markering meerdering, 9 r, PM voor einde toer (13 st)

Tr 4: r tot eerste M, m1L, r tot einde tr (14 st)

Herhaal tr 4 tot het aantal steken bereikt is wat in het schema vermeld staat voor de maat.

Daarna brei je alle toeren recht zonder te meerdering tot de totale lengte vermeld bij de maat in het schema.

Dan iedere tr vóór de eerste marker 2rsam tot er 15 st over zijn, kant alle steken af en knip de draad af op ca 30 cm.

Afwerking

Was en blok de prothese in vorm. Laat goed plat drogen. Het vullen met Fiberfill kan op het laatste moment als de gebreide deelprotheses naar een draagster gaan. Tot die tijd netjes en droog bewaren in een afgesloten opbergdoos. Hoeveelheid vulling: goed vullen zodat de draagster niet bij hoeft te vullen maar alleen eruit hoeft te halen.

Uitgifte

De breiprotheses mogen alleen gratis gegeven worden. We geven altijd een setje, dus voor 1 borst 2 gebreide protheses. We bieden het altijd netjes aan in een (was) zakje en vanaf 2024, ook schoon gewassen. Er mag altijd meer besteld worden. Bij het uitgeven advies geven over dragen (vulling, modelleren) en wassen.

Voor support:

knittedknockersnederland@gmail.com

of 06 44533756

Corrie Kuster

Breiblij



Knitted Knocker – kleine deelprothese

door Jose Hertogs en De Breischool

Maat tabel

Nummer zie tabel onder	Maat in cm	Opzetten	Meerder tot	Breien tot totale hoogte	Minder tot	Gewicht breiwerk in gram	Vulling ca. in gram
0	11	3 st.	21 st	8 cm	15 st	4	4
1	12	“	24 st	8 cm	“	5	4
2	13	“	24 st	9 cm	“	5	5
3	14	“	24 st	9,5 cm	“	6	5
4	15	“	27 st	10 cm	“	7	5
5	16	“	27 st	11 cm	“	8	6
6	17	“	27 st	12 cm	“	9	6
7	18	“	30 st	12 cm	“	10	6
8	19	“	30 st	13 cm	“	11	6
9	20	“	30 st	14 cm	“	12	7
10	21	“	30 st	15 cm	“	13	7
11	22	“	30 st	15,5 cm	“	14	7
12	23	“	33 st	16 cm	“	15	8
13	24	“	33 st	17 cm	“	16	8
14	25	“	33 st	18 cm	“	17	8

	CUP	CUP	CUP	CUP	CUP	CUP	CUP	CUP
nummer	band	band	band	band	band	band	band	band
maat	70	75	80	85	90	95	100	105
0	A							
1	B	A						
2	C	B	A					
3	D	C	B	A				
4	E	D	C	B	A			
5	F	E	D	C	B	A		
6		F	E	D	C	B	A	
7			F	E	D	C	B	A
8				F	E	D	C	B
9					F	E	D	C
10					G/H	F/G/H	E/F/G/H	D/E/F/G/H